


# ①アラートマスターご使用方法

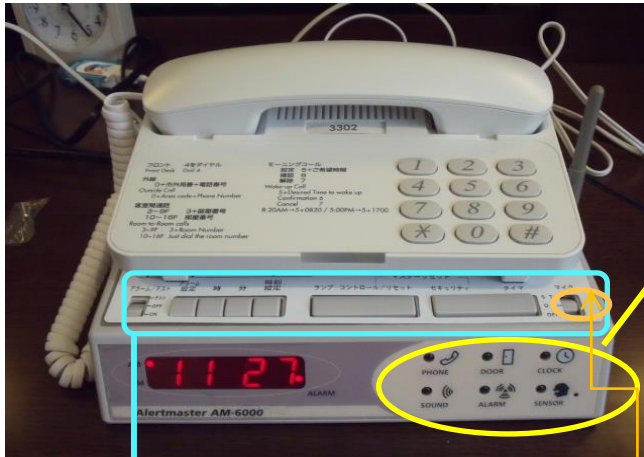

該当する項目が赤く点滅します。

- ☆、受話器マーク…電話をお知らせします
- ☆、ドアのマーク…ドアのノックをお知らせします。
- ☆、時計のマーク…目覚まし音をお知らせします。
- ☆、サウンドのマーク…緊急時のホテル放送、TV音及び会話など拾った音に反応して点滅します。

※ALARMとSENSORは反応しませんので、ご了承お願いいたします。




サウンド機能を使用しない場合は、マイクをOFFにしてください。

## 目覚まし時計セット方法

※左写真は、電話機を取り除いた図です。

- ①、現在の時刻が正確であるか確認して下さい。
  - ②、「アラーム設定」ボタンを押しながら
  - ③、「時」「分」ボタンを押して、目覚めたい時刻を設定します。
- ☆、左側のリセットボタンを押すと目覚ましが停止します。

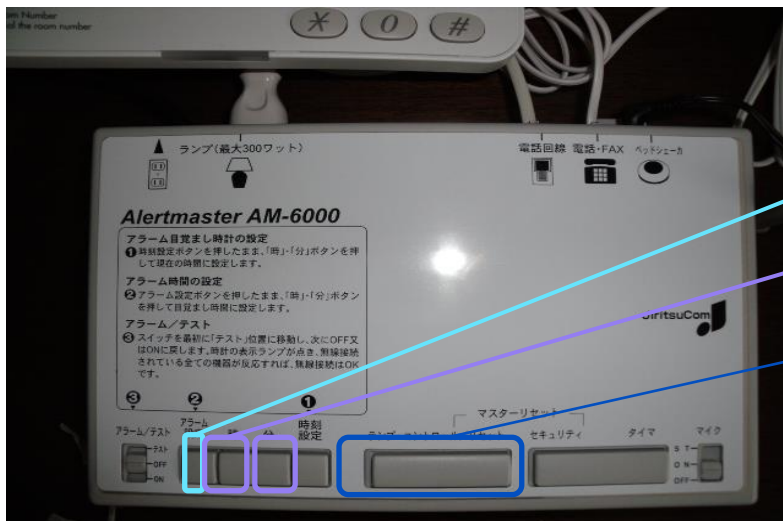

## その他付属品について



### ②“ベッドシェーカー”

お電話、ドアノック、目覚まし、サウンドなど  
アラートマスター本体点灯と連動し、振動します。

※振動の停止・・・アラートマスター本体にある「マスターリセット」の左側を押して下さい。



### ③“ランプ”

ベッドシェーカーと連動して  
光ります。

## ④ワイヤレスドアカメラ及びモニターのご使用方法



← “ワイヤレスモニター”



← “ワイヤレスドアカメラ”・・・ドア内側のドアスコープ(のぞき穴)に取り付けてあります。

ご来客時などドアスコープから見える範囲の外の様子をご覧いただく場合

- 1) モニターの「モニター入/切」ボタンを押して下さい。  
(相手の方が動いていると、画像がブレて映る場合がございます。)
- 2) 確認が終わりましたら、「モニター入/切」ボタンを押  
(ワイヤレスドアカメラは約20秒表示すると、自動的に消えます。)

## ユニバーサルルームのイス設置後の風景(2タイプ)

高さ、設置に関してはスタッフが出来るだけ同行し手伝うようにする。



⑥通常の設置タイプ(背もたれあり)のイス



⑦背もたれのないイス

	個数
①アラートマスター	4
②ベッドシェイカー	4
③ランプ	4
④ワイヤレスモニター	4
⑤イス(バスタブのふちにかけるタイプ)	0
⑥イス(背もたれのあるタイプ)	4
⑦イス(背もたれなし)	2
⑧ドアノッカー	0
⑨簡易筆談器 書きポン	4